



一、準備測試


<圖片中萃取管僅為示意說明>

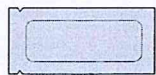



1 使用前請檢查包裝上的保存期限，請勿使用超過效期的產品。

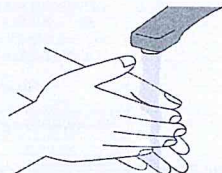

2 進行測試前使用肥皂和水徹底洗手 20 秒，並擦乾雙手。

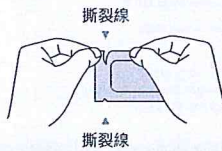

3 依撕裂線撕開箔袋，取出卡匣並將其放在平坦且乾淨的桌子上。確認卡匣完好無損。如果包裝內沒有乾燥劑，請勿使用該卡匣。

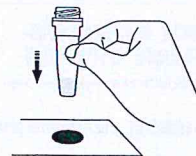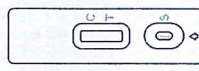


4 將裝有萃取液的試管牢牢握在手中，將萃取液瓶蓋轉開/拔開或將封膜撕開，請將試管放置在包裝盒上的凹洞槽中。液體若溢出，則需要使用新的萃取管。


二、收集鼻腔檢體樣本




1 用紙巾輕擤一下鼻子，不要用紙巾直接清潔鼻子。

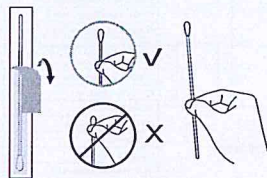


2 打開包裝取出採檢刷，請勿用手觸摸尖端的軟墊。

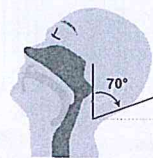

3 將頭向後傾斜約 70 度。

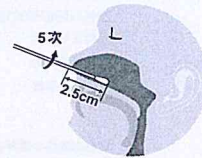


4 輕緩地將帶有軟墊的採檢刷尖端插入您的一個鼻孔，緩慢滑動採檢刷大約向內 2.5 公分(平行於您的嘴巴頂部，不向上)直到遇到阻力。不要施加任何壓力。採檢刷於鼻腔內壁以重圓方式旋轉至少 5 次(大約需要 15 秒)，再將其從鼻孔取出。

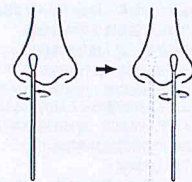


5 使用同一支採檢刷，在另外一個鼻孔中重複步驟 3 和 4。
注意：多次使用同一支採檢刷後，兩側鼻孔取得足夠的樣本。

三、進行測試


<圖片中萃取管僅為示意說明>

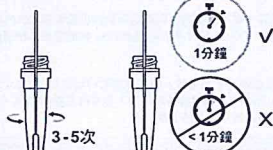


1 將取樣後的採檢刷尖端插入試管底部轉動至少 3-5 次，然後靜置 1 分鐘。
注意：採檢刷尖端於試管底部未達 1 分鐘，檢體見其不飽和，會影響判斷結果。

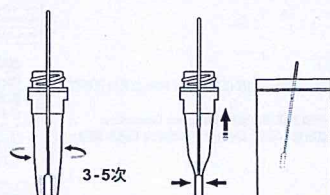

2 取出時，將採檢刷尖端沿著管壁內側轉動至少 3-5 次，然後一握用手擠壓試管的側面，以儘可能將採檢刷刷刷的液體全部擠出。將使用過的採檢刷放入塑膠處理袋中。

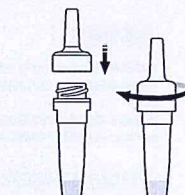


3 將滴管牢固的蓋上試管並擰緊或壓緊。

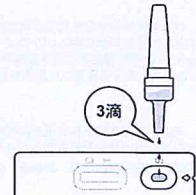


4 將試管倒立如上圖，在圓孔 (S) 槽中滴入 3 滴的液體。
注意：請不要超過 5 滴，滴入過多液體會破壞 1 號、2 號檢測結果。請勿少於 3 滴，滴入液體不足，則測試完全失敗，會導致判斷錯誤。



15分鐘

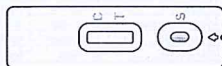

5 滴入樣品後計時 15 分鐘判斷結果，請將測試結果拍照留存。注意：
1. 靜置 20 分鐘後仍無結果，則測試可能不正確。
2. 確保採檢刷妥善放置在平坦的桌子上，在過程中不要移動卡匣。

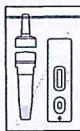

6 判斷完成後，將使用後的試管、滴管、無菌採檢刷、檢驗卡匣放入塑膠處理袋中，封裝後依右邊方框內容處理。


- 測試完成後，如檢驗結果為陽性，請將檢體及檢測裝置妥善密封，於前往社區檢驗院所檢驗時，交付給檢驗進行妥善廢棄物處理。
- 測試完成後，如檢驗結果為陰性，請將檢體及檢測裝置放在塑膠處理袋中，並將所有測試包材料丟棄在垃圾筒內。

詳細操作影片



四、檢驗結果判讀

Positive
陽性反應

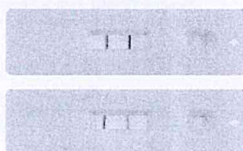

1 Positive result 陽性結果

卡匣上的測試線(T)與控制線(C)皆呈色，無論哪條線先呈色此結果即為陽性結果。在指定時間內呈色的測試線(T)，即使顏色淺仍應判定為陽性結果。檢驗結果為陽性代表您很有可能感染 COVID-19，請立即前往採檢院所採檢，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。


Negative
陰性反應



2 Negative result 陰性結果

僅控制線(C)呈色，而測試線(T)不可見，可判定為陰性結果，您可能未患有 COVID-19。陰性結果意味著導致 COVID-19 的病毒未在您的樣本中找到。但是，此檢測可能會給某些患有 COVID-19 的人提供不正確的(偽陰性)的陰性結果。這意味著即使測試為陰性，您仍可能患有 COVID-19。如果是這樣的話，醫事人員將考慮檢測結果與您其他方面的病史，如症狀或可能的接觸史，以決定如何照顧您，重要的是您與醫事人員的合作，以瞭解您應該採取的下一步行動。

Invalid
無效反應

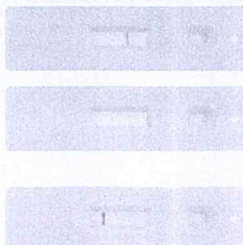

3 Invalid result 無效反應

只要控制線(C)未呈色，即使測試線(T)呈色，結果仍視為無效。如果檢驗結果為無效，請重新採集檢體，並使用新的測試卡匣重新測試，如對測試結果有疑慮的話，可向原購買地點或是試劑廠商或醫療器材商洽詢。

控制線(C)呈色，測試線(T)呈現出淡淡線體(但非綠色)
此為無效結果，請重新採集檢體，並使用新的測試卡匣重新測試。